



MASQUE BARRIÈRE ANTI PROJECTION LAVABLE

MASQUE CATÉGORIE UN 1 A
USAGE PROFESSIONNEL NON
SANITAIRE REF #3.2



MASQUE Par l'atelier COCO&RICO // **SIÈGE SOCIAL** : 34 rue pierre rigaud - 94200 Ivry sur seine
SHOWROOM : 98 rue quincampoix - 75003 Paris // **SIRET** : 804 331 429 // **TVA** : FR86804331429

**FABRICANT
RÉFÉRENCE**

Coco&Rico
Masque barrière anti projection réutilisable, développé suivant les spécificités fournies AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020.

COMPO


Intérieur bicouche polypropylene 2 x 35gr. matière certifiée catégorie UN 1 par la DGA. // Barrette en métal sur le nez pour éviter les infiltrations

ENTRETIEN

Laver avant 1ère utilisation // Lavage en machine à 60° // Changer toutes les 4h

TRACABILITÉ

// Lavable 10 fois // Séchage en machine à température modérée 60° // Fabrication 100% française // Composants français et européens

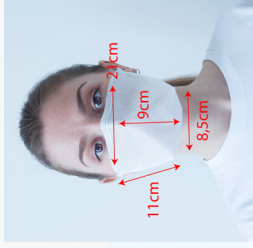

*Les éléments photographiques caractéristiques illustrant les Produits ne sont pas contractuels, ce que le Client reconnaît. Un échantillon peut être envoyé avant la validation de la commande.

**La couleur du masque peut différer de celle affichée ci dessus selon les stocks de matières disponibles.

Fabrication par l'atelier

COCO&RICO

NOTICE UTILISATEUR A CONSERVER

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre masque réutilisable.

Masques à Usages Non Sanitaires

Suivant la note d'information interministérielle du Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère de l'économie et des finances et du Ministère du travail, parue le 29 mars 2020 et conformément aux précisions apportées par l'avis de l'ANSM du 25 mars 2020.

Urgence sanitaire

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. Rappelons que cette notice a été produite en période de confinement national, peu de temps après la classification par l'OMS du Covid 19 en tant que pandémie. Elle a donc été rédigée au mieux dans une situation d'urgence. Ce document est susceptible d'évoluer dans son contenu et sa forme. Ceci afin de corriger d'éventuelles erreurs ou imprécisions et naturellement d'apporter des améliorations issues de retours d'expérience. La responsabilité des signataires et du fabricant COCO&RICO ne saura être engagée à quelque titre que ce soit.

En tant que fabricant, nous avons fait de notre mieux avec les outils donnés par le gouvernement français pour développer et produire un masque qui protégera des projections son porteur, mais nous rappelons qu'il n'est pas à usage sanitaire et qu'il faut appliquer les gestes barrières. Nous ne sommes pas responsables si une personne qui a porté le masque contracte le virus Covid-19.

CATÉGORIE 1 - UNS 1

Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux professionnels

affectés à des postes ou mission comportant un contact régulier avec le public.

FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :

COCO&RICO

34 rue pierre rigaud, 94200 l'ivy sur seine

SIRET 804 331 429 - TVA FR66804331429

code APE : 00030

CONTEXTE D'UTILISATION

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement national en vigueur depuis le 17 mars 2020, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

Ce nouveau modèle de masque en tissu répond à un niveau de performance moins ambitieux que celui des masques chirurgicaux et FFP2, destinés en priorité aux professionnels de santé.

Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre par exemple). Toutefois, la réalité en date du 22 avril 2020 est que le Sénat français est en train de réfléchir à modifier cette législation afin de permettre aux professionnels qui nous achètent nos masques de les autoriser à les distribuer en B2C. Par conséquent, si la législation change après avoir acheté nos masques, vous serez habilités à les distribuer au grand public.

Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.



Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux) et norme NF EN 14683, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2) et norme NF EN 149.

Étiquetage et conditionnement

Les masques UNS seront à destination d'acteurs économiques (B to B), et selon l'article 14 du règlement (UE) N° 1007/2011, « (...) les étiquettes ou les marquages peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque les produits sont fournis à des opérateurs économiques dans la chaîne d'approvisionnement (...) ».

Information B2C

COCO&RICO, agissant en tant que fabricant de masques de catégorie UNS, ne pourra jamais être tenue responsable de l'étiquetage, du conditionnement et de l'utilisation du masque par les consommateurs finaux; cette responsabilité étant imputable exclusivement au distributeur des masques, quelles que soient les modalités de cette distribution (gratuite ou payante, dédiée à une catégorie particulière, etc).

En application du Règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, tout opérateur économique qui met un équipement de protection individuelle sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un produit de telle manière que la conformité aux exigences du règlement risque d'en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.

Si vous êtes distributeur, il est de votre entière responsabilité de prendre les mesures relatives à votre activité de distribution.

PERFORMANCES :

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Masque catégorie 1 (UNSI) : masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S⁻¹ pour une dépression de 100 Pa

CONDITIONS GÉNÉRALES

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, Deux nouvelles catégories de masques à usages non sanitaires ont été créées, par une note d'information des Ministères de la santé, de l'économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020.

COCO&RICO a fabriqué ce masque en suivant le Guide d'exigences minimales, de méthodes d'essais, de confection et d'usage émises par AFNOR SPEC S76-001 dans son document du 27 mars 2020.

La matière des masques fabriqués par COCO&RICO a été testée par la Direction Générale pour l'Armement (DGA) en suivant le Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Les masques de COCO&RICO ne sont ni un dispositif médical ni un masque FFP2.

Utilisez ce masque uniquement pour les utilisations prévues, telles qu'elles sont décrites dans la présente notice. Un masque barrière est destiné à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptômes) clinique(s) d'infection virale et n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes.

Seule la protection limitée contre le risque visé est revendiquée.

Ce masque ne fait l'objet d'aucune autorisation, homologation ni aucune certification, ni par l'AFNOR, ni par aucun laboratoire de certification. Conformément au Règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux

équipements de protection individuelle, il a fait l'objet d'une évaluation de la conformité par le fabricant.

COCO&RICO ne saurait être tenu responsable en cas d'utilisation ne respectant pas les consignes strictes d'utilisation et d'entretien figurant dans la présente notice pour l'utilisateur accompagnant chacun des masques.

REMERCIEMENTS

Nous remercions l'IFTH et le CSF pour leur initiative extraordinaire en créant le groupement des Masques lavables Français. Nous remercions également tous les fournisseurs et les fabricants français brillants qui ont contribué et rassembler toutes leur énergie sans réserves pour fabriquer des millions de masques réutilisables.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET DE MANIPULATION :

Précautions d'emploi : une utilisation incorrecte du masque ou le non-respect des consignes d'utilisation indiquées ci-dessous peut provoquer de sérieux risques pour la santé.

Avant de mettre un masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique

Pour une réutilisation du masque, s'assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations du paragraphe ENTRETIEN

1 - METTRE UN MASQUE BARRIÈRE



1 - Placer le masque barrière sur le visage, la barrette nasale sur le nez.

2 - Tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles, sans les croiser.



3 - Abaisser le bas du masque barrière sous le menton et vérifier que le masque couvre bien le menton.

4 - Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez.

Vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place. Vérifiez l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.

2 - LORSQUE L'ON PORTE UN MASQUE

Le temps de port du masque est limité à 4 heures.



Eviter de toucher le masque

Ne pas déplacer le masque ou le porter sur le menton ou sur la tête pour parler.



Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Si besoin de boire ou de manger changer de masque !

Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.

Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement français :

<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>

3 - POUR RETIRER LE MASQUE :

1 - Ne pas toucher le devant du masque et l'enlever uniquement par les élastiques

2 - Placer immédiatement le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre)

3 - **Se laver les mains** avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

4 - **Nettoyer l'extérieur du contenant** spécifique avec un produit nettoyant.

4 - ENTRETIEN - MÉTHODE DE LAVAGE

COMPOSITION : VOIR FICHE TECHNIQUE

Ce masque a été conçu pour être **lavé et réutilisé 10 fois maximum**.



Sortez le masque du contenant dans lequel vous l'avez stocké et placez le dans la machine à laver. Ensuite, se laver les mains immédiatement après l'avoir placé dans la machine.

Laver en machine à 60°C avec un programme d'eau minimum 30 minutes de cycle.

Utiliser un détergent classique. L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée.

3

Séchage en tambour. Il est recommandé un séchage complet de masque dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Le masque ne doit pas sécher à l'air libre. On peut le sécher à l'aide d'un sèche cheveux. *Il n'est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes.*

<https://www.afnor.org/fac/masques-barrieres/>

Ne pas repasser.

Une inspection visuelle avec des gants des mains lavées doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de dommage du masque (s'il est moindre d'ajustement, déformation, usure, etc **le masque doit être jeté**).

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, à température ambiante, sec et à l'abri de la lumière.

MASQUE CATÉGORIE UN 1 REF #3

Par l'atelier COCO&RICO





Siège social : 34 rue pierre figaud, 94200 Ivry sur seine

Showroom : 98 rue quincampoix, 75003 Paris
Siret : 804 331 429
TVA: FR86904331429
clea@cocostrico.com



COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

-  **Se laver très régulièrement les mains**
-  **Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir**
-  **Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter**
-  **Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades**

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000